


FLEXI-Funk

REVISION 4

BEDIENUNGSANLEITUNG TASTER / SENDE

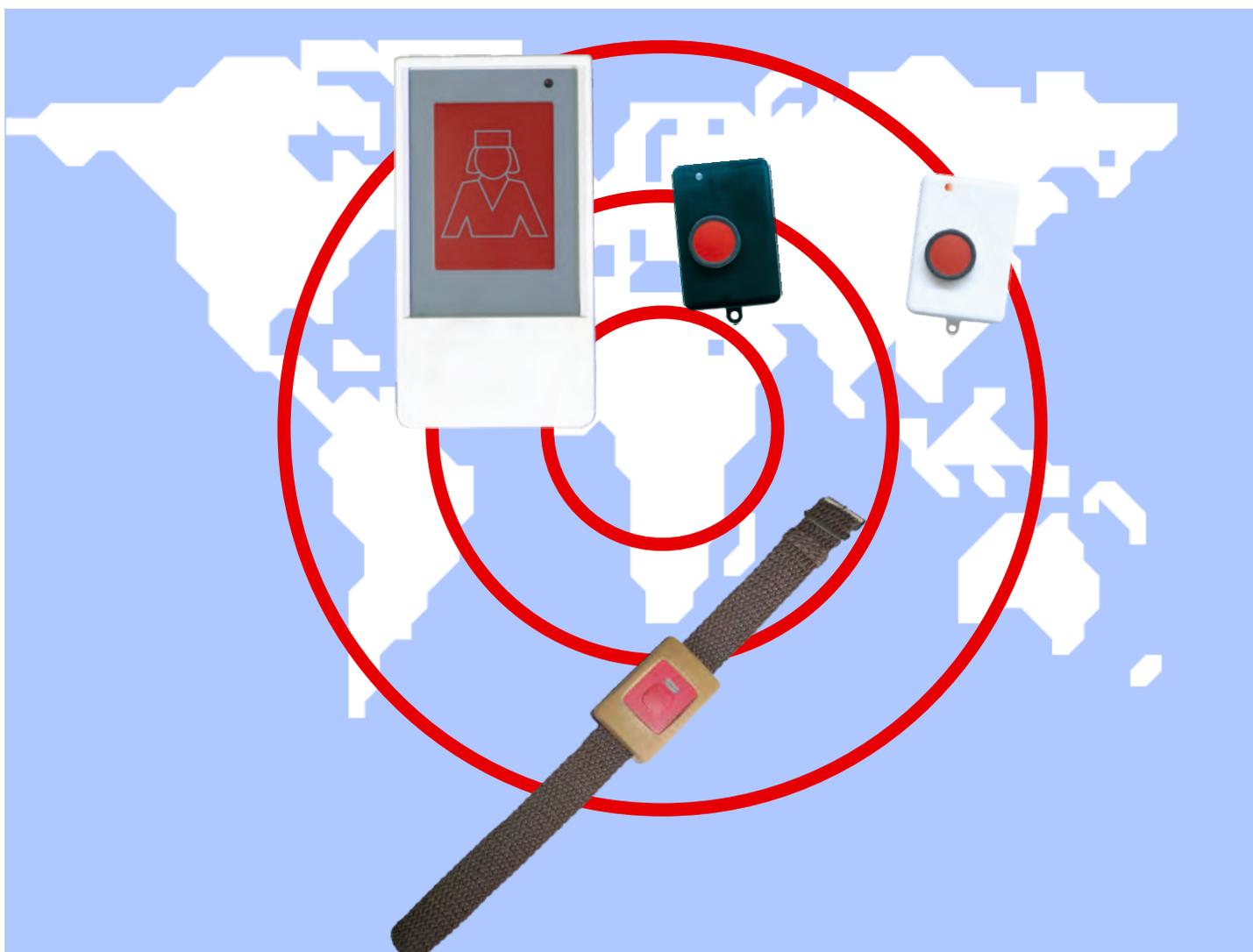

GUTGESELL GmbH
Arenskule 9A
21339 Lüneburg
Deutschland
Tel: 04131 75 318 - 0
Fax: 04131 75 318 - 99
www.gutgesell.org
info@gutgesell.org

Artikelnummer: 1283**FLEXI Nano Arbandsender**www.gutdat.de**Produktbeschreibung:**

Der Funksender FLEXI-Nano ist ein kleines, handliches Gerät um drahtlos Rufe auszulösen. Über einen eingebauten Rückstellkontakt, können die Rufe direkt am Gerät per Magnet quittiert werden.


Bei jeder Auslösung wird der Batteriewert kontrolliert. Wird ein Grenzwert unterschritten erfolgt zusätzlich ein Batteriealarm.

Der Funksender FLEXI-Nano kann als Armband oder als Medaillon getragen werden.

Produktmerkmale:

- kleine Abmessungen: 43x29x16mm (LxBxT)
- große, rote Ruftaste
- Beruhigungslampe (LED in rot)
- Batterieüberwachung und Batteriealarm
- erhöhte Sicherheit durch bestätigte Funkprotokolle (Dualfunk)
- als Armband oder mit Adapter als Medaillon tragbar
- freie Wahl des Armbandes durch Standard-18mm-Aufnahme (nicht im Lieferumfang enthalten)
- handelsübliche preiswerte Batterie: CR2032
- geringe Folgekosten: alle Einzelteile als Ersatzteil lieferbar
- Gehäusefarbe: beige

Lieferumfang: Sender, Federstege, Batterie, Anleitung, Standard Perlon Armband

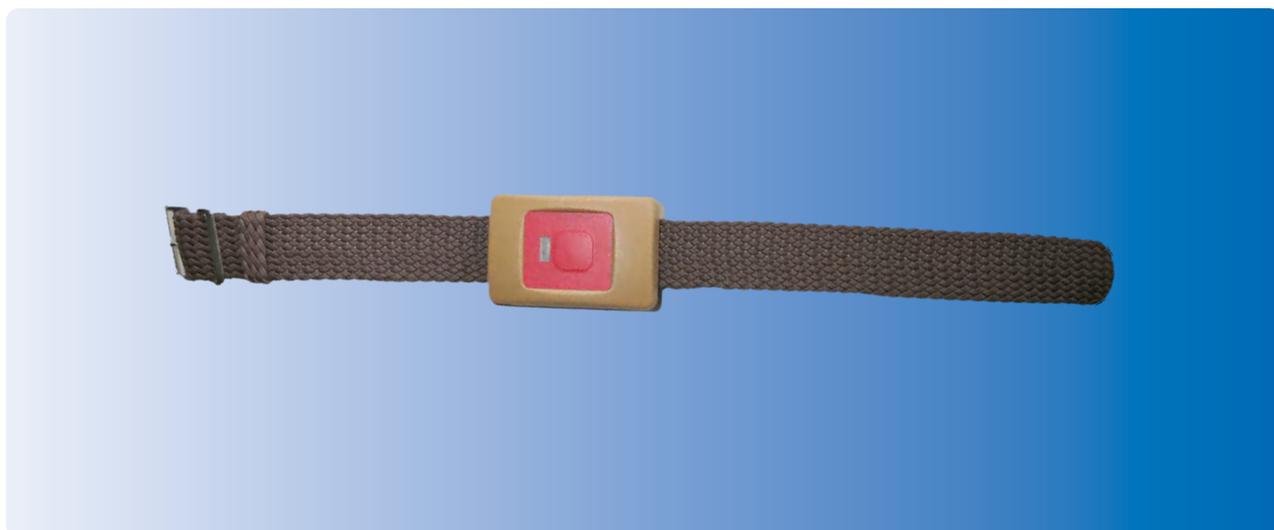

Bearbeiter: J. Witte, 07.04.2015	Geprüft: B. Gutgesell, 07.04.2015	Freigegeben: B. Gutgesell, 07.04.2015	Revision: 4	Datei: FLEXIFunk_BK58	Seite 3 von 8
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------	-----------------------	---------------

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Logos, Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Artikelnummer: 1005 / 1066

FLEXI-Mini-Sender (1005) / FLEXI-Mini-Sender QA (1066)

www.gutdat.de

Kleiner Funkruftaster im FLEXI-Systemfunk. Durch den eingebauten Sender und Empfänger ermöglicht der FLEXI-Systemfunk ein Höchstmaß an Sicherheit.

- 1 rote Taste zur Rufauslösung
- 1 robuster Magnetschalter zur Rufquittierung (**nur 1066**)
- optische Bestätigung durch LED
- automatische Sendewiederholung bis zur Quittierung durch Empfänger
- automatisch neues Einbuchen / Routing bei Standortwechsel oder schwachen Empfang
- sichere Übertragung auch bei zeitgleicher Übertragung durch Kollisionskontrolle
- Batteriekontrolle mit Alarmmeldung auf Zentrale
- Betrieb mit Knopfzellen 2 x CR2016 Batterie
- RISC-Controller
- Frequenz 868MHz
- postzugelassen und gebührenfrei
- Lieferumfang: FLEXI-Mini-Sender, 2 x Batterie, Schlüsselring + Sicherheitskordel
- Farbe: schwarz oder weiss
- Maße ca: 53x37x20mm (BxHxT)



A1163 - Halskette Kordel, schwarz mit Sicherheitsverschluss

Bearbeiter: J. Witte, 07.04.2015	Geprüft: B. Gutgesell, 07.04.2015	Freigegeben: B. Gutgesell, 07.04.2015	Revision: 4	Datei: FLEXIFunk_BK58	Seite 4 von 8
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------	-----------------------	---------------

Artikelnummer: 1005 / 1066

FLEXI-Mini-Sender (1005) / FLEXI-Mini-Sender QA (1066)

www.gutdat.de

Der FLEXI-Mini-Sender verfügt über nebenstehende Tasten und Lampen.

Anhand der Tasten können unterschiedliche Rufe ausgelöst werden.

Jeder Ruf wird durch die Lampe (optisch) angezeigt.



Rufart	Ereignis	Anzeige
normaler Ruf	Betätigung der roten Ruftaste	LED blinkt rot
Abstellruf	Magnet wird an der oberen Seite vorbei geführt	LED blinkt grün
Notruf	Ruftaste gedrückt halten, Magnet wird an der oberen Seite vorbei geführt, Ruftaste loslassen	LED blinkt rot, LED blinkt einmal grün



Wichtiger Wartungshinweis!

Die Batterien sind einmal jährlich zu wechseln.

Es sind ausschließlich Lithium Zellen 2 x CR2016 zu verwenden.

Die Batterien sind unter die „Lasche“ des Batteriehalters zu schieben (siehe Bilder, roter Pfeil).

PLUSpol liegt bei beiden Batterien oben.

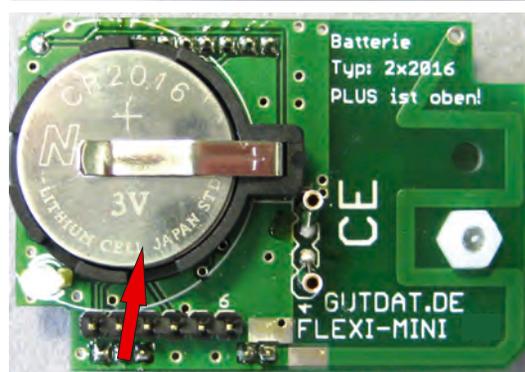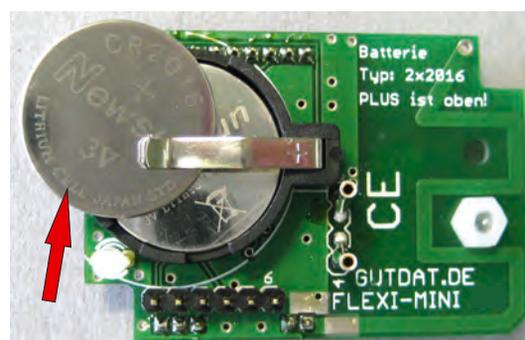

Artikelnummer: 0692 - 0547 - 1009 - 1010
FLEXI Funk-Großflächentaster FLEXI-GFT

Extra großer Funkruftaster im FLEXI-Systemfunk. Durch den eingebauten Sender und Empfänger ermöglicht der FLEXI-Systemfunk ein Höchstmaß an Sicherheit.

FLEXI-GFT (0692)

- 1 grosse rote Taste zur Rufauslösung
- optische Bestätigung durch LED
- akustische Bestätigung durch Summer
- automatische Sendewiederholung bis zur Quittierung durch Empfänger
- automatisch neues Einbuchen / Routing bei Standortwechsel oder schwachen Empfang
- sichere Übertragung auch bei zeitgleicher Übertragung durch Kollisionskontrolle
- Batteriekontrolle mit Alarmmeldung auf Zentrale
- Betrieb mit handelsüblicher 9V Block-Batterie
- RISC-Controller
- pflegeleichte Frontfolie
- Frequenz 868MHz
- postzugelassen und gebührenfrei
- Lieferumfang: FLEXI Funk-Großflächentaster, Batterie
- Farbe: weiss (creme)
- Maße ca: 65x120x22mm (BxHxT)

FLEXI-GFT QA (0547) / (Spezifikationen zusätzlich zum FLEXI-GFT)

- 1 robuster Magnetschalter zur Rufquittierung
- Assistenzruf durch zeitgleiches Rufen und Quittieren

FLEXI-GFT QA IP (1009) / (Spezifikationen zusätzlich zum FLEXI-GFT)

- IP 64 "Spritzwasserdicht"
- 1 robuster Magnetschalter zur Rufquittierung
- Assistenzruf durch zeitgleiches Rufen und Quittieren

FLEXI-GFT QAN Western (1010) / (Spezifikationen zusätzlich zum FLEXI-GFT)

- 1 Nebensteckkontakt zur Aufnahme externer Rufauslöser
- 1 robuster Magnetschalter zur Rufquittierung
- Assistenzruf durch zeitgleiches Rufen und Quittieren

optionale
Westernbuchse



Bearbeiter: J. Witte, 07.04.2015	Geprüft: B. Gutgesell, 07.04.2015	Freigegeben: B. Gutgesell, 07.04.2015	Revision: 4	Datei: FLEXIFunk_BK58	Seite 6 von 8
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------	-----------------------	---------------

Artikelnummer: 0692 - 0547 - 1009 - 1010
FLEXI Funk-Großflächentaster FLEXI-GFT

Der FLEXI Funk-Großflächentaster (FLEXI-GFT) verfügt über nebenstehende Tasten, Buchsen (Versionsabhängig) und Lampen.

Anhand der Tasten können unterschiedliche Rufe ausgelöst werden.

Jeder Ruf wird durch die Lampen (optisch) und einen Buzzer (akustisch) angezeigt.

Lampe für Rufanzeige (rote LED)



grosse rote Ruftaste

Rufart	Ereignis	Anzeige
normaler Ruf	Betätigung der roten Ruftaste	LED blinkt, Buzzer ertönt
Abstellruf	Magnet wird an der linken Seite vorbei geführt	LED blinkt, Buzzer ertönt
Notruf	Ruftaste gedrückt halten, Magnet wird an der linken Seite vorbei geführt	LED blinkt, Buzzer ertönt



Ein Abstell- oder Notruf überschreibt die Auslösung eines normalen Rufes, aber nicht umgekehrt.


Ein Ruf wird solange gesendet, bis er empfangen wird.

Wichtiger Wartungshinweis!

Die Batterien sind einmal jährlich zu wechseln. Es sind ausschließlich alkalische Batterien zu verwenden. Zum Batteriewechsel auf der Rückseite das Batteriefach aufschrauben und 9V-Block Batterie vom Batterieclip abhebeln.



Nur alkalische Batterien verwenden!

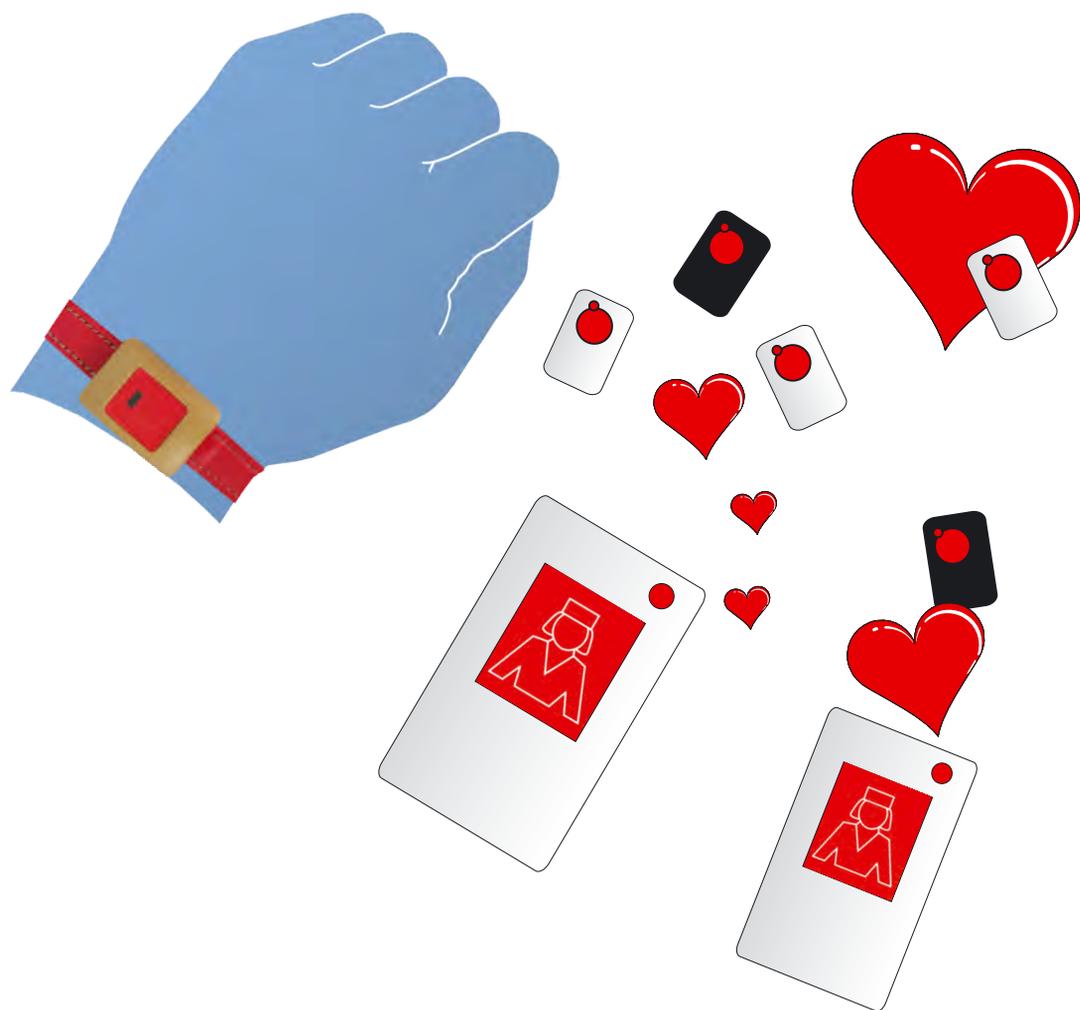

GUTGESELL GmbH
Arenskule 9A
21339 Lüneburg
Deutschland
Tel: 04131 75 318 - 0
Fax: 04131 75 318 - 99
www.gutgesell.org
info@gutgesell.org